
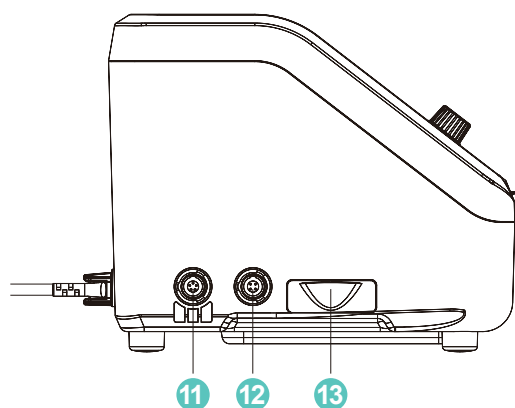
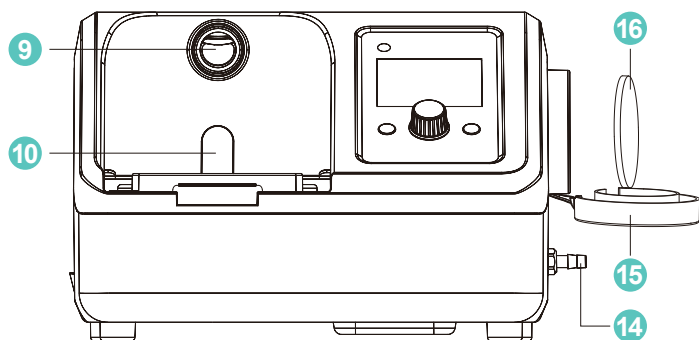


O2FLO 高流量呼吸湿化治疗仪快速操作卡

产品部件概述

- ❶ 待机键
- ❷ 控制旋钮
- ❸ 启动/暂停键
- ❹ LCD显示屏
- ❺ 状态LED灯
- ❻ 电源线
- ❼ 发热盘
- ❽ 罐子锁定按钮
- ❾ 套管
- ❿ 水位感应器
- ⓫ 温度数据线接口（蓝色）
- ⓫ 加热线接口（红色）
- ⓫ SD卡槽
- ⓫ 氧气进气口
- ⓫ 过滤器盖子
- ⓫ 过滤棉

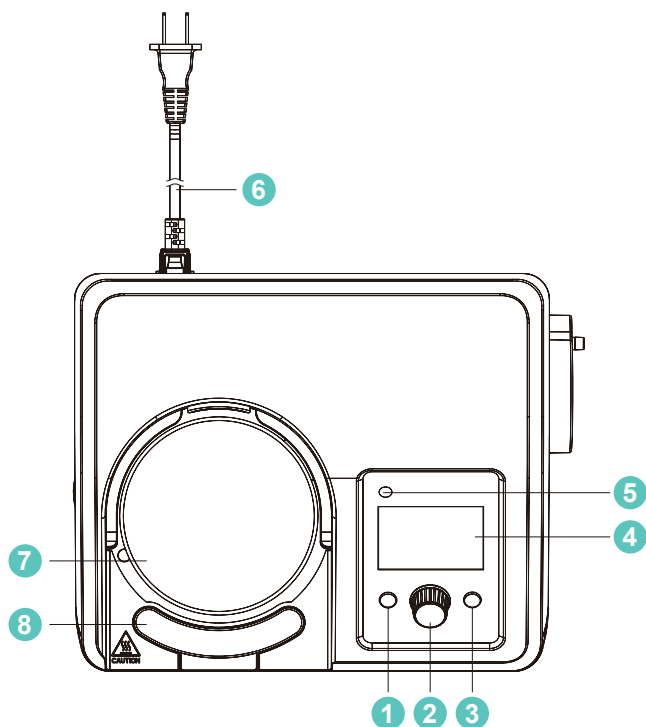

控制面板元素和图标

 待机键	 启动/暂停键	 设置锁定状态	 设置解锁状态
 报警状态	 声音报警 暂停状态	 SD卡插入	 SD卡没有插入 或SD卡错误
 成人模式	 儿童模式	 黄色为 激活状态	 绿色为确定或已设置， 应选择相应的成人或 儿童鼻导管
 低流量模式，运行时， 成人或儿童集成加热 丝呼吸管路均可使用	 设置露点温度，并 显示实时露点温度	 设置流量，并 显示实时流量	 设置氧浓度报警上下限 (默认上限 95%，下限 18%)， 并显示实时氧浓度
 状态LED灯	a. 关机上电显示为绿色闪烁 c. 正常运行显示绿色		
	b. 开机后，暂停运行时不亮 d. 中优先级报警为黄色闪烁；高优先级报警为红色闪烁		

操作指南

第一部分：治疗前装置连接

1. 安装 VHC60 湿化罐。按压湿化罐锁定按钮，同时将罐子弯曲接头对准套管，推入湿化罐直至锁定按钮弹出，即安装到位。
2. 将 VHC60 湿化罐的滴管插入水袋底部的连接处，并打开滴管上的通气帽。然后将无菌水袋挂在设备的上方，此时水袋中的水将自动滴入湿化罐并保持一定的水位，水位不应高于湿化罐的最大水位线。请确保滴管没有打结或堵塞。若设备发出“缺水”报警，则提示水位过低，请及时更换水袋。
3. 妥善连接 VUN-300 连接线，加热呼吸管路和湿化罐。
4. 选择合适的鼻导管，并连接到加热呼吸管路。
5. 如需连接氧气，请用氧气管连接氧气进气口和氧气源并安装流量计，调节氧流量直至屏幕显示所需的氧浓度值（请在设备开机后打开流量计并调节）。

第二部分：启动治疗

1. 长按待机键开机，并开始自检，此时检测设备的功能是否正常工作，状态 LED 灯依次以红色、绿色和黄色点亮，屏幕显示设备信息，设备发出哔一声。
2. 设备若为出厂后第一次开机，将进入主控制界面，默认为成人模式。此后治疗仪会按照上次所设置的参数运行。
3. 旋转控制旋钮选择模式，并设置该模式下的露点温度、流量和氧浓度。

第三部分：运行中参数调整

1. 如需更改参数，先将控制旋钮旋转到锁定状态图标 ，按压控制旋钮解锁 .
2. 旋转控制旋钮选择参数，更改露点温度设置和（或）流量设置和（或）氧浓度报警限值，并确认参数重新锁定。
3. 如确认选择低流量模式后，旋转控制旋钮到时间图标设置时间参数。